





## Schultergurt OmoLoc®

Anleitung zum Anbringen des Schultergurts

# OmoLoc®

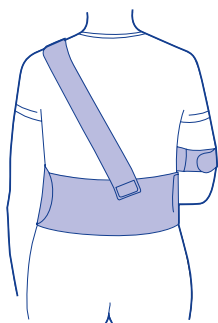


1

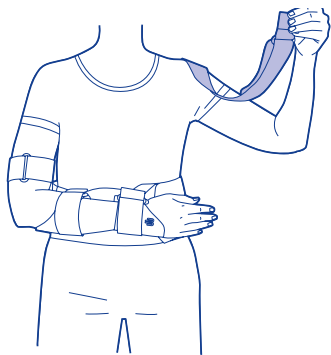


2



3

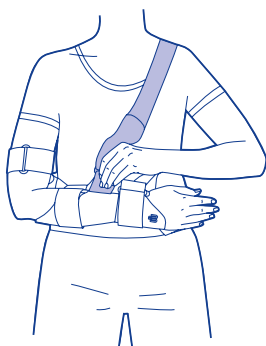

4

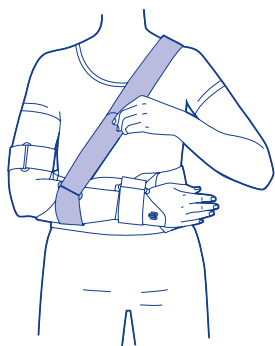

5



30°C  
86°F



## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihr Vertrauen in ein Bauerfeind-Produkt. Mit dem Schultergurt haben Sie eine ergänzende Komponente für unsere Orthese OmoLoc erhalten. **Lesen Sie bitte zusätzlich zu dieser Kurzanleitung die Gebrauchsanweisung der OmoLoc vollständig und sorgfältig durch.** Heben Sie diese Gebrauchsanweisung auf, vielleicht möchten Sie diese später noch einmal lesen. Wenden Sie sich bei auftretenden Fragen an Ihren behandelnden Arzt oder Ihr Fachgeschäft.

Für eine zusätzliche Stabilisierung kann bei Bedarf der Schultergurt bei dem Produkt OmoLoc genutzt werden.

**Lassen Sie sich ggf. beim Anbringen und Anlegen der Omo Loc mit dem Schultergurt von einer zweiten Person helfen.**

### Anbringen des Schultergurtes bei der Orthese OmoLoc

**Bild 1:** Kletten Sie den Schultergurt im Rückenbereich auf der Außenseite der OmoLoc fest. Legen Sie die Orthese wie in der Gebrauchsanweisung der OmoLoc beschrieben an. **Bild 2:** Führen Sie den Gurt über die gesunde Schulter nach vorn. **Bild 3:** Kletten Sie das Ende des Schultergurtes mit der eckigen Klettflasche entweder auf dem Unterarmgurt oder **Bild 4:** auf dem Bauchgurt fest. **Bild 5:** Lösen Sie nun das runde Klettende und stellen Sie die Länge des Gurtes individuell ein.

### Reinigungshinweise

**Hinweis:** Setzen Sie den Schultergurt nie direkter Hitze (z. B. Heizung, Sonneneinstrahlung, Lagerung im Pkw) aus! Schäden am Material sind möglich. Dies kann die Funktion des Gurtes beeinträchtigen.

Schließen Sie alle Klettverschlüsse, um Beschädigung zu vermeiden. Waschen Sie den Gurt mit einem milden Waschmittel per Handwäsche. Lassen Sie den Schultergurt an der Luft trocknen.

### Materialzusammensetzung

Polyamid (PA), Polyurethan (PUR), Polyoxymethylen (POM), Polyester (PES), Polypropylen (PP)

### Barrierefreie Version

[www.bauerfeind.de/barrierefrei](http://www.bauerfeind.de/barrierefrei)

Stand der Information: 2025-01

 **BAUERFEIND AG**  
Triebeser Straße 16  
07937 Zeulenroda-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-40 00  
F +49 (0) 36628 66-44 99  
E info@bauerfeind.com  
**BAUERFEIND.COM**

